


Eye LIFT procedūra



PAGRINDINĖ APŽVALGA

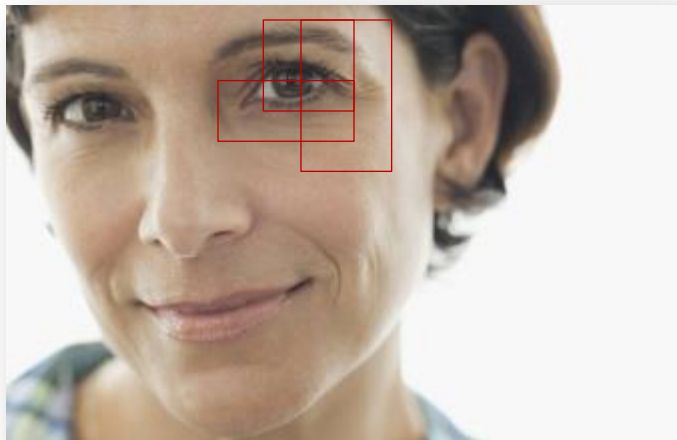

Akių kontūro zonoje atsirandantys senėjimo ir nuovargio požymiai:

- Nukritę akių vokai
- Raukšlės
- Paburkimai ir tamsūs ratilai


→ **Tamsios, pavargusios akys**



Nukritę akių vokai



Raukšlės


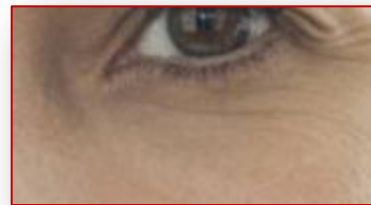


Paburkimas ir tamsūs ratilai

PRIEŽASTYS



Senstant odai,

sumažėja **KOLAGENO** ir
ELASTINO gamyba

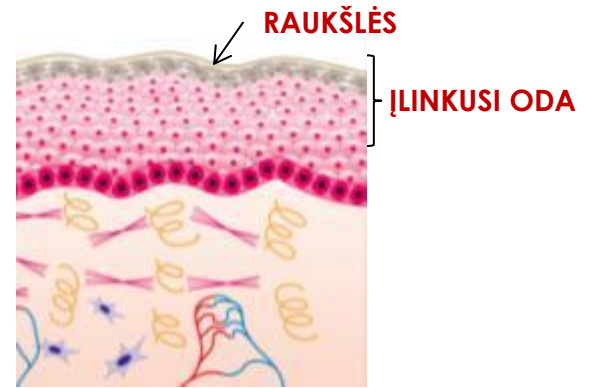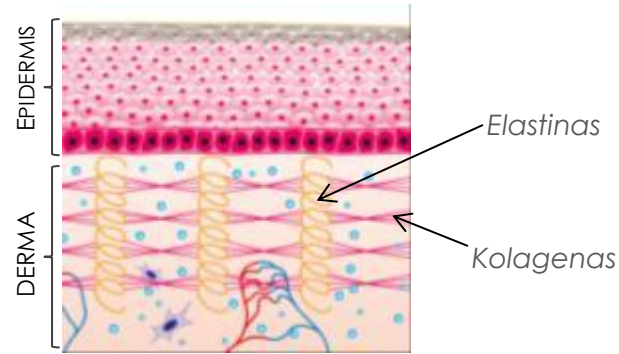


Senstant odai ir esant
nuovargiui,

sulėtėja **LIMFOS** ir **KRAUJO**
CIRKULIACIJA

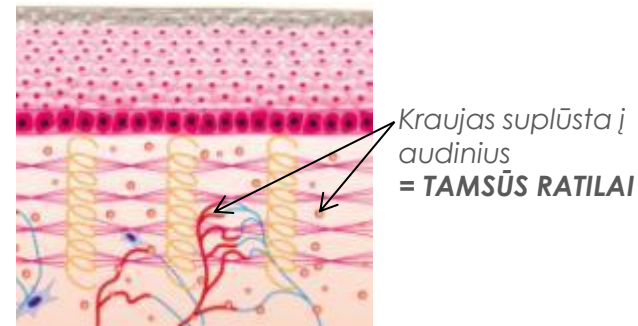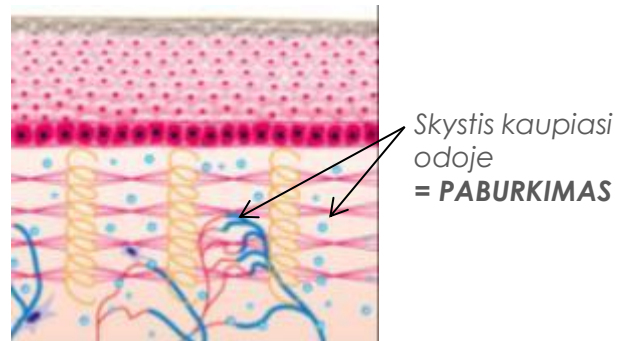


ODOS PRIEŽIŪROS PRODUKTAI

Veikia ANT ODOS

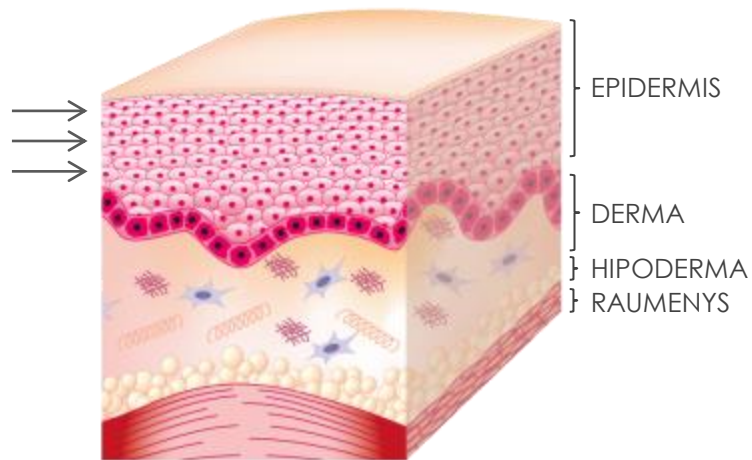


EYE LIFT PROCEDŪRA

Veikia **RAUMENIS** ir odą
neprilygstamam pakėlimo efektui

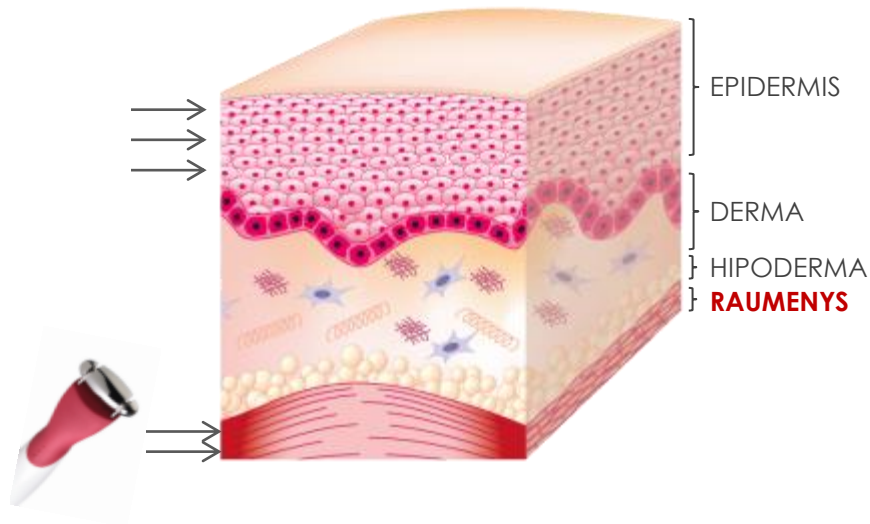

EYE LIFT PROCEDŪRA

EYE LIFTING procedūra

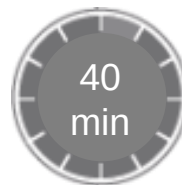

SUMAŽINA SENĖJIMO IR NUOVARGIO POŽYMIUS
raumenų stimuliavimo būdu

Akys pasikeičia – tampa atviresnės, jaunatviškesnės ir atgaivintos

- Akių vokai atrodo „pakelti“
- Raukšlės ir linijos lygesnės
- Sumažinami paburkimai ir tamsūs ratilai



VEIKIMO MECHANIZMAS



*Raumenys užtikrina akių
kontūro tonusą*

RAUMENŲ STIMULIAVIMAS



Stangrina odą
atstatant
raumenų apimtį




**Sumažina paburkimus
ir tamsius ratilus**
gerinant mikrocirkuliaciją

APARATINĒS PROCEDŪROS METODAS

3 pagrindiniai žingsniai

Eye LIFT procedūra

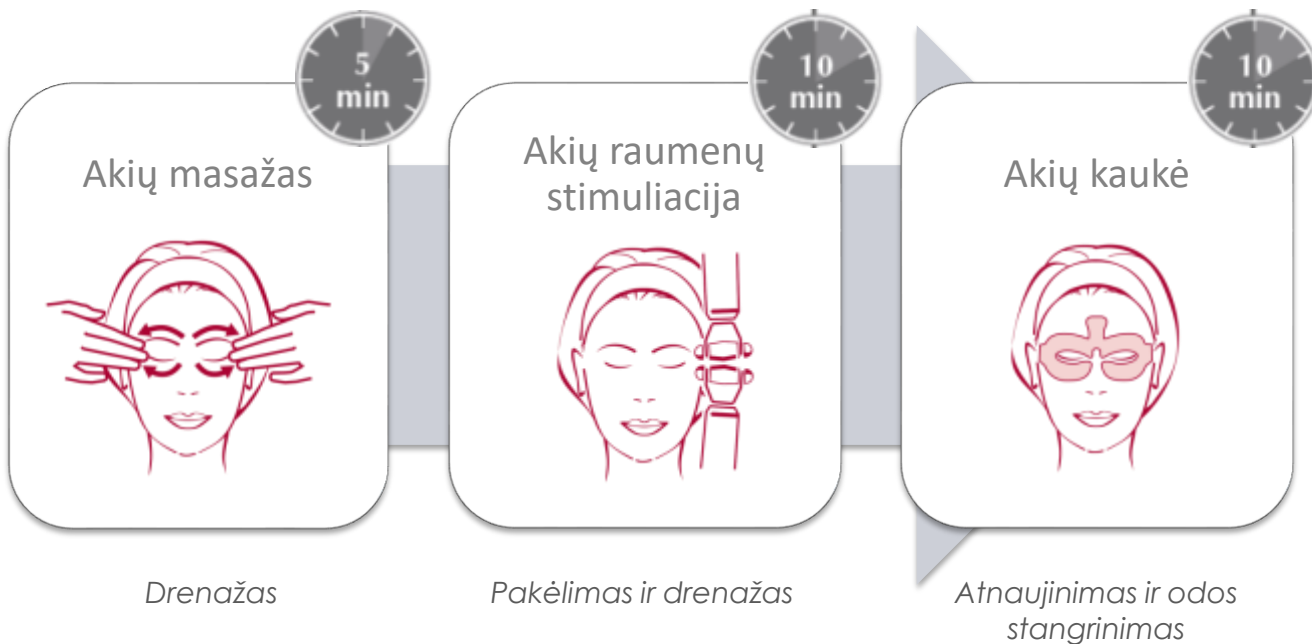

EYE LIFT PROCEDŪRA

Akių masažas



Akių raumenų
stimuliacija



Akių kaukė



1 žingsnis



Akių masažas

AGE LOGIC akių masažo serumas

Tikslai:

- ❖ Padėti drenuoti nereikalingus skysčius ir padidinti mikrocirkuliaciją, siekiant sumažinti paburkimus ir tamsius ratilus;
- ❖ Suteikti odai jaunesnę išvaizdą.

Kokiu būdu:

- ❖ Drenavimo manevrai;
- ❖ Veikliosios medžiagos, kurios atjaunina, drenuoja ir oksiduoja
ATP - 56 ląstelinės veikliosios medžiagos - pro-deguonis

EYE LIFT PROCEDŪRA

2 žingsnis



Akių masažas



Akių raumenų stimuliacija



Akių kaukė



Akių raumenų stimuliacija

AGE LOGIC akių želė-serumas

Tikslai:

- ❖ Odos stangrinimas;
- ❖ Paburkimo ir juodų ratilų mažinimas;
- ❖ Linijų, esančių kampuose ir tarp akių, lyginimas;
- ❖ Akių vokų „pakėlimas“;
- ❖ Akių atmerkimas.

Kokiu būdu:

- ❖ Raumenų stimuliacija


Frontalinis (kaktinis) raumuo

Žiedinis akies (antakio, paakio) raumuo

Žiedinis akies (akies kampo) raumuo

- ❖ Veikliosios medžiagos, kurios atjaunina, drenuoja ir oksiduoja

ATP - 56 ląstelinės veikliosios medžiagos - pro-deguonis

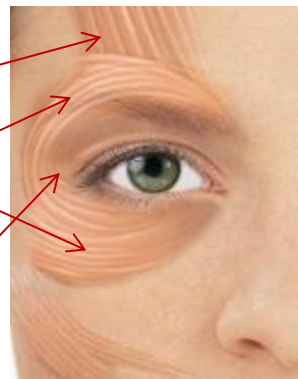

3 žingsnis



Akių masažas



Akių raumenų
stimuliacija



Akių kaukė



Eye Mask

Akių kaukė Age Logic

Tikslai:

- ❖ Akivaizdžiai sumažinamos raukšlės, paburkimai ir tamsūs ratilai
- ❖ Stangrinama oda

Kokiu būdu:

- ❖ Veikliosios medžiagos, kurios atjaunina, stangrina ir skaistina

ATP - 56 ląstelinės veikliosios medžiagos - pro-deguonis - Vitaminas C

EYE LIFT PROCEDŪROS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

1 žingsnis Akių masažas	Modelage Yeux Age Logic <i>Drenuojantis akių masažinis serumas</i>	Jauninimui ATP (<i>Adenosine Triphosphate</i>) 56 veikliosios medžiagos Antiglikacinis junginys Pro-deguonis Nuo paburkimo Eye Liss Nuo tamsių ratilų Kaštonai	Saugo ir tiekia svarbiausią energiją gyvybinėms ląstelių funkcijoms Pagreitina ląstelių atsinaujinimą ir metabolizmą Apsaugo baltymus nuo oksidacinio streso Pagerina ląstelių oksigenaciją, skatinant jų metabolizmą Stiprina kapiliarų odos barjerą Gerina odos mikrocirkuliaciją
2 žingsnis Akių raumenų stimuliacija	Sérum Gel Yeux Age Logic <i>Stangrinamoji akių želė-serumas</i>	Jauninimui ATP (<i>Adenosine Triphosphate</i>) 56 veikliosios medžiagos Pro-deguonis Nuo paburkimo Eye Liss Nuo tamsių ratilų Vienaląsčių dumblių ekstraktas	Saugo ir tiekia svarbiausią energiją gyvybinėms ląstelių funkcijoms Pagreitina ląstelių atsinaujinimą ir metabolizmą Pagerina ląstelių oksigenaciją, skatinant jų metabolizmą Stiprina kapiliarų odos barjerą Gerina odos mikrocirkuliaciją

EYE LIFT PROCEDŪROS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

3 žingsnis Akių kaukė	Masque Yeux Age Logic <i>Jauninamoji, skaistinamoji kaukė</i>	Youth ATP (<i>Adenosine Triphosphate</i>) 56 veikliosios medžiagos Antiglikacinis junginys Pro-deguonis Dynalift Stabilizuotas vitaminas C	Saugo ir tiekia svarbiausią energiją gyvybinėms ląstelių funkcijoms Pagreitina ląstelių atsinaujinimą ir metabolizmą Apsaugo baltymus nuo oksidacinio streso Pagerina ląstelių oksigenaciją, skatinant jų metabolizmą Akimirksniu stangrina Apsaugo nuo laisvųjų radikalų, turi antioksidacinių savybių
------------------------------------	---	---	--

Akimirkams,

Akys atrodo atgaivintos ir akivaizdžiai jaunatviškesnės

SENĖJIMAS

- ❖ Raukšlės ir linijos yra lygios – pasak **92.3%** apklaustųjų*
- ❖ Akių vokai „pakelti“

Akys atviresnės ir jaunatviškesnės

NUOVARGIS

- ❖ Paburkimai matomai sumažėję – pasak **84.6%** apklaustųjų*
- ❖ Tamsūs ratilai matomai sumažėję – pasak **100%** apklaustųjų*

Akys pailsėjusios ir skaistesnės – pasak **84.6%** apklaustųjų*


100% apklaustųjų pastebėjo „pakėlimo“ efektą akių kontūro srityje*

REZULTATAI

SENĖJIMO POŽYMIŲ REZULTATAI PO 1 PROCEDŪROS


RAUKŠLĖS

RAUKŠLIŲ GYLIO POKYTIS

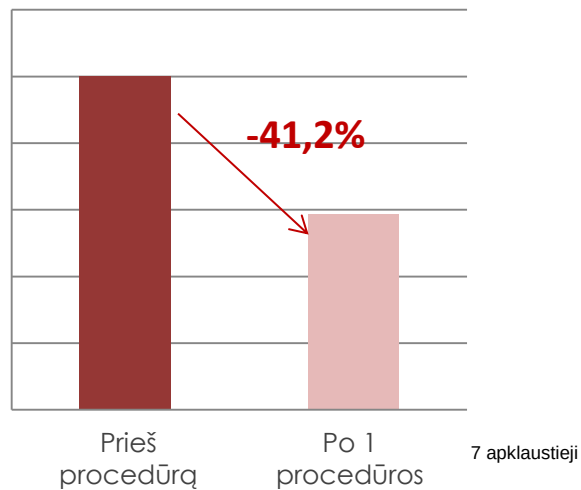


Po 1 procedūros, giliausios raukšlės gylis vidutiniškai sumažėjo **41.2%**

Prieš procedūrą

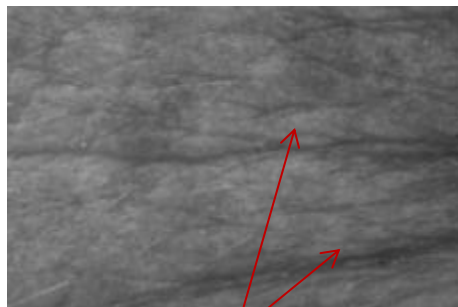

Gilios raukšlės

Po 1 procedūros

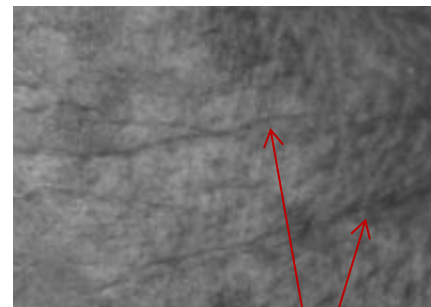


Raukšlių gylis matomai sumažėjo

Po 1 procedūros ženkliai sumažėja didžiausių ir giliausių raukšlių gylis.

REZULTATAI

STANGRINIMAS


STANGRUMO POKYTIS

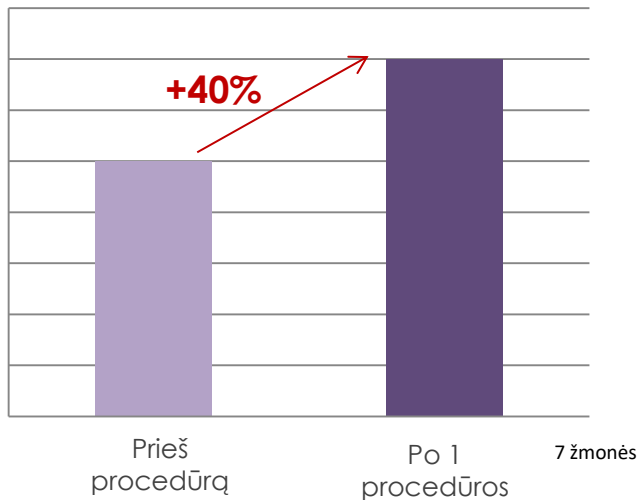

Po 1 procedūros, āķu srities odu stangrumas vidutiniškai padidējo 40%.

DRĒKINIMAS

DRĒGMĒS LYGIO POKYTIS

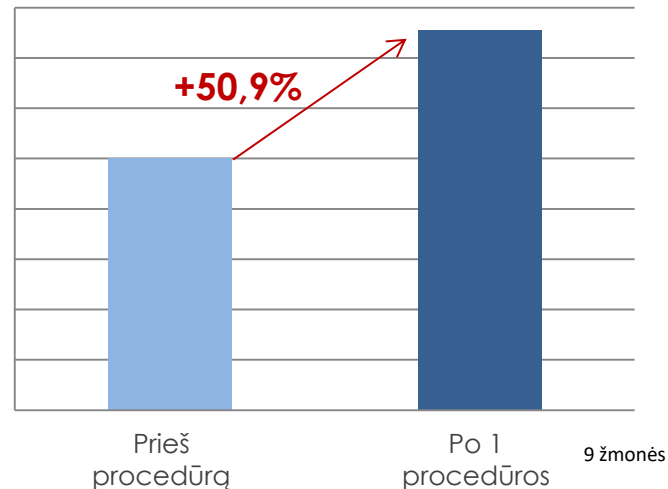

Po 1 procedūros, drēgmēs lygis vidutiniškai padidējo 50,9%.

REZULTATAI

NUOVARGIO POŽYMIŲ REZULTATAI PO 1 PROCEDŪROS

SKAISTUMAS

PADIDĖJO SKAISTUMAS




Po 1 procedūros, skaistumas vidutiniškai padidėjo 2%.

REZULTATAI

TAMSŪS RATILAI

TAMSIŲ RATILŲ POKYTIS

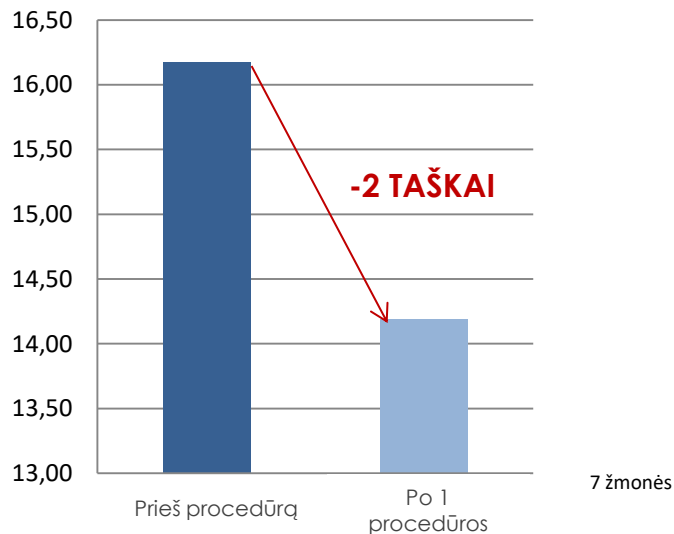


Po 1 procedūros, a^* (raudonos) spalvos koncentracija iš tarptautinės CIE komisijos $L^*a^*b^*$ spalvų paletės **sumažėjo 2%.**

Tai parodo žymų tamsių ratilų sumažėjimą.

PABURKIMAS

PAKŲ PABURKIMO POKYTIS

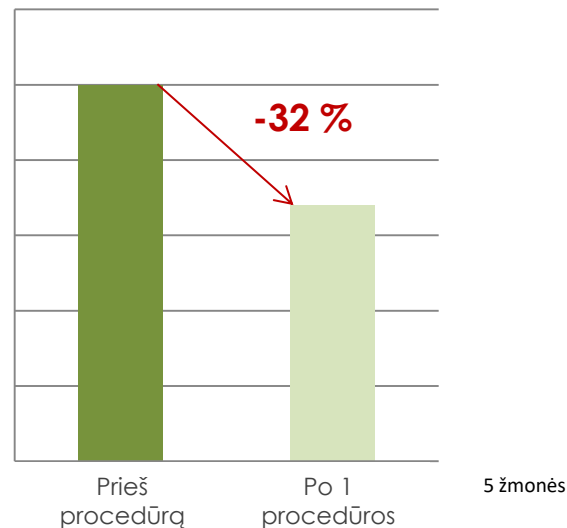

Po 1 procedūros, paburkimas **vidutiniškai sumažėjo 32%.**

Grožio gydytojo pastebėjimai:

Senėjimo požymiai:

- Raukšlės ir linijos
- Nukarę akių vokai

Nuovargio požymiai:

- Paburkimai
- Tamsūs ratilai

Eye LIFT procedūra

Klausimai klientui:

- ✓ Ar kada nors jums buvo atlikta akių srities procedūra?
- ✓ Ar naudojate priežiūros priemones, skirtas akių sričiai?



PRIEMONIŲ PASIŪLYMAS

Aš rekomenduoju „Eye Lifting“ procedūrą, kuri atlieka raumenų stimuliaciją, siekiant sumažinti senėjimo ir nuovargio požymius, bei atgaivinti akių išvaizdą.

TREATMENT ROOM Prescription



EYE LIFT Treatment

EYE LIFTING procedūra

*Sumažina senėjimo ir nuovargio
požymius raumenų stimuliacijos dėka*

ENTRE 2 SOINS[®]

MASQUE
AGE LOGIC
YEUX



*Kartą ar du per
savaitę*

TIME LOGIC
AGE SERUM



Nakčiai

CRÈME YEUX
AGE LOGIC



Ryte ir vakare



SUGIHARA

PRO

UAB "Sugihara PRO"

Šaltupio g. 5, Vilnius

Vilniaus regionas: Jurgita +370 612 28906

Kauno regionas: Loreta +370 687 48065

Klaipėdos regionas: Ilona +370 610 30543

Šiaulių regionas: Ilona +370 614 55116

Utenos/Alytaus/Marijampolės regionas: Ernesta +370 611 34315

Nemokama užsakymų linija 8 800 24 444

uzsakymai@sugiharapro.lt www.sugiharapro.lt